

## フレックスポートカフの洗浄・消毒方法


1. フィッティング両側面のつまみ部分をつまんでフレックスポートカフからフィッティングとチューブを外します。



2. カフのポート内に水分が侵入しないよう、洗浄用カフポートプラグでポートを密閉します。



カフポートプラグ(表面)

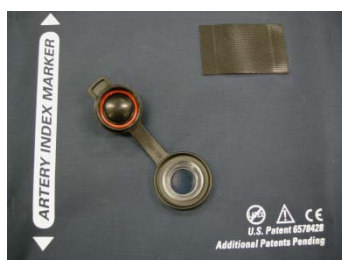

カフポートプラグをポートに取り付けます。(裏面を上)



取り付けたカフポートプラグを折り返し、密閉します。

3. 【洗浄】 70%のイソプロピルアルコールで清拭するか、0.5%の漂白剤溶液または中性洗剤を水で 1:9 の割合に薄めた溶液で清拭した後、溶液をよく拭き取って乾かします。ランドリーにかける場合は中性洗剤を温水に薄め(最大 60%まで)、通常サイクルで洗浄します。
4. 【消毒】施設の規定に基づき、消毒します。消毒剤の使用にあたっては消毒剤の添付文書を参照してください。
5. 洗浄、消毒が終わった後、カフに変形および損傷がないことを確認します。