

- * *平成 23 年 10 月 24 日 改訂(第 3 版)
- * 平成 21 年 10 月 30 日 改訂(第 2 版)

器(02)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン プロフェッショナルペンライト

* 【警告】

- ・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】
- ・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】
- ・電池・電球を交換の際には、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換して下さい。
- ・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照射したりしないで下さい。【目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります】
- ・瞳孔径や嫌悪反応が通常でない場合は、目を保護して下さい。

【禁忌・禁止】

- ・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】
- ・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】
- ・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

【形状・構造】

製品番号 76600 を示す。



【使用目的、効能又は効果】

一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるペン型ライトである。

【品目仕様等】

照明系

・ハロゲン系ライト

使用電池

・単 4 型アルカリ電池(2 本)

寸法

・長さ 148mm、径 13mm、幅 17mm(使用時)

【操作方法又は使用方法】

- 1)ライトの上部ノブを上方にスライドさせライトを点灯使用する。
- 2)ノブを下方にスライドすると消灯する。

* * 【使用上の注意】

- ・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定の物以外は使用しないで下さい。
- ・本製品に使用する電池は、単 4 型アルカリ電池以外の電池は使用しないで下さい。特に初期電圧の高いタイプの電池(オキシ水酸化ニッケル使用の電池)を使用した場合、多くの電流が流れるため、ランプの寿命が極端に短くなり、またランプ取り付け部分が高温になり変形する場合があります。
- ・電池の交換は 2 本を同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池を一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
- ・電池交換の際は、電池の向きに十分注意して下さい。電池の向きを間違えた場合、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
- ・本製品を高温・高温又は腐食性ガスなどの環境に入れしないで下さい。電池の破損や本体内部の錆び・腐食の原因になります。

- ・本製品に入っている電池は点灯確認のための電池です。通常の電池寿命は保証されておりません。
- ・機器を長時間使用しないときは、電池を取り外して下さい。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

* * 【保守・点検に係わる事項】

電球(ランプ)の交換

本体中央を持ち、先端の電球(ランプ)部分を回転させて取り外します。(誤ってスイッチ部分を回転させないで下さい。破損の原因になります)

電池の交換

先端の電球(ランプ)部分を取り外し、本体内にアルカリ単 4 電池 2 本を電池のプラス(+)側が電球側を向くように 2 本を同じ向きに入れて下さい。電球(ランプ)部分を本体に回しながら取り付けます。

取り付けの際には、電球部分を無理な力で取り付けしないで下さい。

洗浄・清掃方法

本製品外側部分は、少量のぬるま湯やアルコールで湿らせた布などで拭くことができます。拭いた後は、湿気を十分に取るか十分乾燥させた後に使用してください。(過度に水分・アルコールを付けて拭くと、水分・アルコールが本体内部に侵入し故障の原因となります)

【包装】

本体:1セット又は 1 組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル

電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ アレン、インク(アメリカ合衆国)Welch Allyn Inc.