

ウェルチ・アレン シュアサイト

【警告】


- ・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】
- ・本体のハウジングを開披すると、有害な不可視レーザーの放射に曝露される恐れがあります。なお、ご使用者自身で開披できるのは、電池装填口のカバーだけです。
- ・本書に記載された以外の方法でボタン操作、調節、手順の実行を行なうと、危険な放射線に曝露される恐れがあります。
- ・本装置は電磁波の干渉が現在の必要とされる標準に従っていますので他の装置に影響を引き起こす、あるいは他の装置から影響を受けません。しかし安全のため他の装置の近傍でこの装置の使用は避けて下さい。
- ・直射日光下での使用は出来ません。

【禁忌・禁止】

- ・本製品は可燃性の麻醉ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】
- ・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】
- ・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

【形状・構造】

シュアサイト外觀図(代表例)
14000

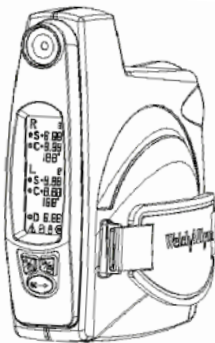

【使用目的、効能又は効果】

本品は、他覚式屈折視力検査機器で矯正視力検査及び屈折検査に用いられる装置です。

【品目仕様等】

- ・寸法:16.5X19.7X5.1センチ(奥行、高さ、幅)
- ・重量:約900グラム
- ・電撃に対する保護の形式による分類:クラスII機器
- ・電撃に対する保護の程度による装着部分類:BF形装着部

【操作方法又は使用方法】

1. いずれかのボタンを押して本体をONにします。
2. 本体が操作しやすい目の高さに被検者を定位します。
3. 小児/成人モード切換ボタンを押して小児または成人モードを選択します。切り換わると電子音が鳴ります。
4. 被検者に検査の開始を指示します。
5. 本体を被検者の目の高さに合わせ、被検者と向き合います。
6. GOボタンを押します。測定中、被検者が正しく固視していることを確認します。
7. 本体を被検者から適切な位置に保持します。
 - 被検者から離れすぎると、“ブーブー”というスローな低音の電子音が鳴ります。
 - ゆっくりと近づきます。適切な距離(35cm)になると、“ブー”という継続した低音が鳴ります。
 - 近づきすぎると、“ピッピッピ”という短い高音の電子音が鳴ります。

- 十字の視標が電子音に対応する形で点滅します。

8. 適切な距離を保った状態で、覗き口を覗き、十字の視標を被検者の右眼に合わせます。測定中は、“ブー”という継続した低音とともに、“ピッ”という非常に高いピッチの電子音が鳴ります。
9. 右眼の測定が終わると、“ピッピー”という電子音が鳴ります。
10. 観察者を軸に回転するように本体を左眼に向け、十字の視標を瞳孔に合わせて、同様に測定を繰り返します。
11. 左眼の測定が終わると、再び“ピッピー”という電子音が鳴ります。
12. 一方の検査眼から充分かつ良好な結果が得られなかったときは、短い電子音が“ピッピッピッ”と5回鳴り、測定が中断したことを知らせます。その眼をもう1度測定し直します。
13. 本体がOFF時にいずれかのボタンを押すとONとなり、前回の測定結果が表示されます。
14. 印字する際は、電子音が鳴るまで印字ボタンを押します。電子音が鳴っている間は、本体をプリンタに向けたまま保持します。

*【使用上の注意】

- ・液体が本器内部に入りますと、故障の原因になります。
- ・本品に使用するACアダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

【貯蔵・保管方法】

- ・以下の条件で清潔な場所に保管して下さい。
- ・保管環境:温度-20℃～49℃、相対湿度10%～100%

【保守・点検に係わる事項】

- *・クリーニング
本品の表示窓は、70%イソプロピルアルコールまたは一般的な窓用洗剤で湿らせた柔らかい布で拭きます。
確実に機能させるために、前窓はつねに清潔に保ってください。
ハウジング、ソフトグリップ、ハンドストラップ、スタンドは、乾いた柔らかい布で拭いてください。または10%Clorox溶液、石鹼水、70%イソプロピルアルコール、アルコールパッド、一般的な窓用洗剤などで湿らせた柔らかい布を用いても構いません。
- ・校正
キャリブレーションマークが現れたときは、最後にキャリブレーションを行なった日から18ヶ月経過したことを示します。再キャリブレーションを行なうため、本品を弊社修理サービスセンターへご返送されることをお奨めします。
ウェルチ・アレン社は、本品を1年ごとに再キャリブレーションされることをお奨めします。

【包装】

本体:1セット又は1組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル
電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ・アレン、インク(アメリカ合衆国) Welch Allyn Inc.