

器(22)医療用照明器

一般医療機器 汎用光源 JMDN 32037000

ウェルチ・アレン 皮膚鏡

【警告】

・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】

・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分及び周辺部が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・電球を交換する際は、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換して下さい。

・本製品の光源を見つめたり、連続して眼(眼球)を照明したりしないで下さい。【眼の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります】

・瞳孔径や嫌悪反応が通常ではない場合は、眼を保護して下さい。

【禁忌・禁止】

・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】

・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】

・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

*【形状・構造】

47300 皮膚鏡外觀図



【使用目的、効能又は効果】

一般手術又は診療に用いる強い光(冷光ということが多い)を発生させる装置である。

*【品目仕様等】

照明系

・ハロゲンランプ

使用電池

・3.5V 充電式ハンドル

*【操作方法又は使用方法】

- 1) ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認して下さい。
- 2) 充電されているハンドルに皮膚鏡ヘッドを差し込む。
- 3) ハンドルのスイッチを押しながらノブを回転させライトを点灯使用する。
- 4) ハンドルのスイッチのノブを逆方向に回転させると消灯する。
- 5) 必要に応じてコンタクトプレートをレチクルコンタクトプレート(47310)あるいはプラノコンタクトプレート(47320)に交換使用する。

*【使用上の注意】

- ・充電式ハンドルに使用する AC アダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。
- ・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定の物以外は使用しないで下さい。
- ・本製品に使用する充電電池は、弊社指定のもの以外使用しないで下さい。
- ・本製品を高温・高湿又は腐食性ガスなどの環境に保管しないで下さい。
- ・ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化する可能性があるため紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないこと。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

【貯蔵・保管に係る事項】

常温で清潔な場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

* 洗浄・清掃方法

・本製品外側部分は、少量のぬるま湯やアルコールで湿らせた布などで拭くことができる。また拭いた後は、湿気を十分に取るか十分乾燥させた後に使用して下さい(過度に水分・アルコールを付けて拭くと、水分・アルコールが本体内部に侵入し故障の原因となります)。

【包装】

本体:1 セット又は1 組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル

電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ アレン、インク (アメリカ合衆国) Welch Allyn Inc.