

**ウェルチ・アレン レチノスコープ****【禁忌・禁止】**

- ・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】
- ・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】
- ・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

**【形状・構造】**

代表例

18200 + 71900-C



16220

**【使用目的、効能又は効果】**

本品は、潜在的な視力の検査に用いる手持ち型の診断機器で、混濁した水晶体眼の患者の視力検査等に用いる。

**【品目仕様等】**

ハロゲンライト

3.5V 充電式ハンドル使用

単三アルカリ電池（2本）使用

**【操作方法又は使用方法】**

- 1) ハンドルの点灯スイッチがオフ状態であることを確認して下さい。
- 2) ヘッドをハンドルの取り付け部に垂直に装着し回転させて固定します。
- 3) ハンドルの点灯スイッチを操作し、照明光を点灯させスイッチの回転により適切な明るさに調節して下さい。
- 4) ヘッドを患者の眼球に向け検査を行います。

**【使用上の注意】**

- ・検査を要する眼以外に使用しないこと。検査を行う際、必要最小限の照度に調整し、連続して長時間眼球を検査しないこと。[網膜に障害を与える恐れがある]
- ・本品は、使用方法を熟知した医師または、医師の指導・監督の下にある者以外は使用しないこと。
- ・本品に患者の体液・血液などが付着した場合は、速やかに洗浄又は拭き取りの上、感染予防のための処置を行うこと。
- ・本品に水などの液体が付着した場合、直ちに拭き取り、乾燥させると。[故障の原因となる]
- ・使用中又は使用直後は、光源部周辺が高温になる場合があるので、ヘッドの交換や電球交換の際には、光源部の温度が十分冷えていることを確認すること。[熱傷などの可能性がある]
- ・交換用ランプは、ウェルチ・アレン社の指定ランプのみを使用すること。[規格の合わないランプの使用は、故障・破損の可能性がある]
- ヘッド部は、清掃などのため分解しないこと。[所期の機能を発揮できなくなる場合がある]
- ・紫外線殺菌灯などの設置された場所に放置しないこと。[ヘッドの光学系やプラスチック部が劣化する可能性がある]

**【貯蔵・保管方法】**

清潔な場所に保管して下さい。

**【保守・点検に係わる事項】****洗浄・清掃方法**

- ・ハンドル及びヘッド本体は、消毒用エタノール又は、希釈した中性洗剤液を含ませた布で拭き、完全に乾燥させます。
- ・ヘッドの光学部は、市販の光学部品用クリーナー等を含ませた柔らかい布などで拭いた後、完全に乾燥させてください。清掃の際は、洗剤液などを過度に付けすぎないように、十分注意してください。

**【包装】**

本体：1セット又は1組

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】****製造販売業者**

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社ビル

電話番号：03-3219-0071

**外国製造所**

ウェルチ・アレン、インク（アメリカ合衆国）Welch Allyn Inc.