

\*平成23年10月24日改訂(第2版)  
平成22年2月8日新規作成

器(02)医療用照明器

一般医療機器 移動型診療用照明器 JMDN 36843000

## ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器

### 【警告】

・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】

・(ハロゲンライト使用製品)本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります。】

・透視法のために本製品は使用しないで下さい。【紅班が生じます】

・30.5cm～91.5cm の距離で本装置は使用して下さい。【より、近距離での使用は診断に適しません】

・(ハロゲンライト使用製品)電球を交換する際は、電源コードを抜き、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換してください。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・(ハロゲンライト使用製品)光源部周辺は使用により高温になる場合があります。ライトの調整などの際は注意して行って下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・本製品の光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照明したりしないで下さい。【目の組織(網膜)に障害を引き起こす可能性があります】

・瞳孔径や嫌悪反応が通常でない場合は、目を保護して下さい。【目の組織(網膜)に障害を引き起こす可能性があります】

・本品に使用する AC アダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。

・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定のもの以外で使用しないで下さい。

### 【禁忌・禁止】

・本製品は可燃性の麻醉ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。【爆発の恐れがあります】

・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】

・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

### 【形状・構造】

代表例を示す。

44303 及び 44503



44200



48810+48950



44610



### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、軽症の診療及び治療時に用いる照明器である。

### 【品目仕様等】

電氣的定格

・入力電源 100V 50/60Hz

照明系

・ハロゲンライト又はLEDライト

機器規格

・電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅠ機器

・水の有害な侵入に対する保護の程度:IP X 0

### 【操作方法又は使用方法】

1. アダプターを電源コンセントに差し込む。
2. 本品ヘッド部分にあるスイッチを入れライトを点灯する。
3. フレキシブルアームを動かし照射位置調整をし、使用する。

### \*【使用上の注意】

- ・本品に使用する AC アダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。
- ・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定のもの以外で使用しないで下さい。
- ・使用後は、電源コードをコンセントより取り外して下さい。
- ・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

### 【貯蔵・保管方法】

以下の条件で清潔な場所に保管して下さい。

温度 -20℃～49℃

湿度 10～95%

気圧 500～1060hPa

### 【保守・点検に係わる事項】

#### 日常の清掃

1. 電源スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントより抜いて下さい。
2. 本器全体は水で希釈した中性洗剤で湿らせた布で清拭できます。きれいな乾いた布で水分を拭き取って下さい。ユニットに水が入らないように、また、プラグの先端が濡れないよう気を付けて下さい。
3. 完全に乾くまで電源コンセントに接続しないで下さい。

### 【包装】

本体:1 セット又は 1 組

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

#### 製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル

電話番号:03-3219-0071

#### 外国製造所

ウェルチ アレン、インク(アメリカ合衆国)Welch Allyn Inc.

ウェルチ アレン、リミティッド(アイルランド)Welch Allyn Ltd.

ウェルチ アレン デ メキシコ(メキシコ)Welch Allyn De Mexico