

器(02)医療用照明器

一般医療機器 額帯灯 JMDN 11963000

ウェルチ・アレン LED ヘッドライト

【警告】

・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】

・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないように注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・電球を交換する際は、電源コードを抜き、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換して下さい。【電気ショック、熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・光源部周辺は使用により高温になる場合があります。ライトの調整などの際は注意して行って下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・本製品の光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照明したりしないで下さい。【目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります】

・皮膚への損傷リスクを最小限とするために、次の事項を守って下さい。

【皮膚が損傷する危険性があります】

- 1) 患部組織を診察する場合、光量を最小にして下さい。
- 2) 照射時間を最小限にして下さい。
- 3) 皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により、皮膚感度が変化している場合は特に注意して下さい。

【禁忌・禁止】

・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。

【爆発の恐れがあります】

・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】

・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

【形状・構造】

カタログ番号 49020 の構成例を示す。



【使用目的、効能又は効果】

術者の前頭部に配置し、手術、診断、治療中の視野を直接照明する。

【品目仕様等】

電氣的定格

・入力電源 100-120VAC 50/60Hz

・出力電圧 5VDC

照明系

・5W LED

・色温度 5500 ケルビン

・光束 50 ルーメン

重量

・170 グラム(アダプター付)

機器規格

・電撃に対する保護の形式による分類:クラス II 機器

・水の有害な侵入に対する保護の程度の分類:IP X 0

【操作方法又は使用方法】

- 1) ヘッドライトに AC アダプター又はバッテリーパックを接続する。
- 2) ヘッドライトを頭部に装着し調整ノブでサイズを合わせる。電源コードは必要に応じてガウンクリップで着衣に固定する。
- 3) AC アダプター又はバッテリーパックの電源スイッチを ON にし点灯する。
- 4) 照明部の調整ノブを左右させスポットライトの径を調整する。

* **【使用上の注意】**

・光源部上方の冷却ファンには帽子などがかぶさらない様に注意して下さい。冷却効率が落ち光源部が高温になる恐れがあります。

・本品に使用する AC アダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。

・ヘッドバンド調節の際、過度にきつく調節すると使用中に疼痛などを起こす場合があります。

・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定の物以外は使用しないで下さい。

・ヘッドライトのケーブルとバッテリーパックを接続する際は、断線の原因となるため必要以上の力でバッテリーパック側の接続部を回さないこと。

・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行うかあるいは弊社修理サービスセンターへ連絡して下さい。

【貯蔵・保管方法】

以下の条件で清潔な場所に保管して下さい。

温度 -20℃～49℃、湿度 95%以下

【保守・点検に係る事項】

* **日常の清掃**

- 1) ヘッドライトと AC アダプター又はバッテリーパックを取り外します。
- 2) ヘッドライトおよびケーブルの被覆部を、中性洗剤溶液を染み込ませた布などで、外装を拭いた後、水をよく絞った布などで洗剤成分を拭き取る。最後に乾燥した布などで、水分を拭き取る。
- 3) ヘッドライトのファン部はほこりあるいはゴミを吸いこんでいるので、エアースプレー等を用いてファン内に取り込まれているほこりあるいはゴミを取り除く。

バッテリーパックの充電

- 1) ヘッドライトからバッテリーパックを取り外す。
- 2) 充電アダプターを電源コンセントに接続する。
- 3) 電源スイッチがオフであることを確認して、充電アダプターを接続する。
- 4) バッテリーパックのインディケーターが点灯し、充電が開始されたことを確認する。
- 5) 充電電地の消耗具合により充電時間は異なります。
- 6) フル充電後 LED ヘッドバンドのランプは約 60 分間使用が出来ます。

【包装】

本体:1 セット又は 1 組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル

電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ アレン、インク(アメリカ合衆国) Welch Allyn Inc.