

ウェルチ・アレン 血圧計 デュラショック™ DS44/45 ポケット型の組立方法

デュラブルワンピースカフの製品仕様変更に伴い、
DS44/DS45 ポケット型の組立方法をご紹介します。

1 組立に必要な製品をご紹介します。



2 ゲージとバルブをそれぞれカフのチューブに
しっかり差し込んでください。



3 チューブのフィッティングをカフのポートに
「カチッ」と音がるまでしっかり押し込んで
ください。



4 カフ上のポケットにゲージを取り付けて
完成です。



何かで不明な点、ご要望などございましたら、弊社担当営業までお問合せください。

WelchAllyn® ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社 www.welchallyn.jp

TEL: 0120-117-720 FAX: 0120-773-353

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル 6F

電話でのお問合せは、月曜日から金曜日の、午前9時～午後6時となっております。