

ウェルチ・アレン 血圧計
デュラショック DS66用 部品番号 (5086-04)
送気球 (DS66用) の交換手順

◆ 事前にご準備頂くもの ◆



左から

- ・ペンチ
- ・滑り防止のゴム
(ゴム手袋か瓶の蓋オープナーでも可)
- ・マイナスドライバー


① 送気球の根本を半時計方向に送気球が本体から外れるまでひねります。



② 送気球がはずれたところです。



③ 金具との接触面にかませているゴムパッキンをなくさないようにしてください

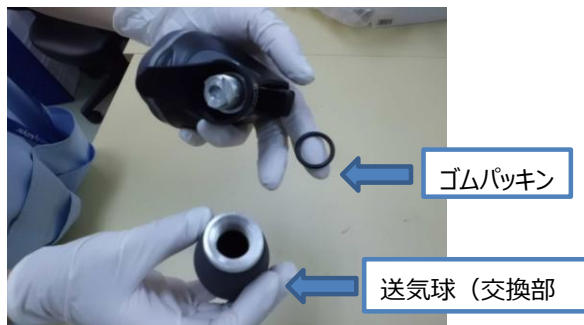

④ 新しい送気球 (5086-04) を本体装着部に挿入し、止まるまで強い力で時計方向にひねります。



⑤ 送気してエア漏れがない事を確認します。

注意

本体から送気球を外した時、稀に本体装着部のネジきり付空気弁金具が送気球側に残ったまま外れる場合があります (写真 a)

その場合の対処方法をご説明します。
(送気球から空気弁金具を取り外し、上記交換手順2.の状態にする方法です)

NG



正常



(写真 a) 送気球5086-04

①ネジきり付空気弁金具がついた送気球側の金属部分に滑り止めゴムを巻きつけます。



②金具部分にマイナスドライバーを差し込み送気球と金具をはずように半時計方向にひねります。



③金具がこのように取れます。




④この金具を本体側に取り付けます。



⑤突起のある側を手前に向けて取り付けます。



⑥新しい送気球を、交換手順 4. に従い、本体装着部に挿入し止まるまで強い力で時計方向にひねります。

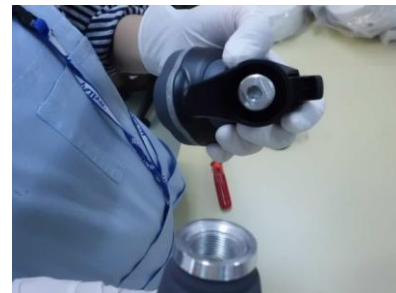

⑦完成です。
送気してエア漏れがない事を確認します。



※送気球交換方法についてのご質問、送気球交換のご用命は
お手数ではございますが、弊社修理サービスセンターまでご連絡下さい。

神奈川県相模原市緑区橋本6-5-10
中屋第二ビル5階K室
ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
修理サービスセンター
TEL 042-703-6084
FAX 042-770-9228