

ウェルチ・アレン 処置・診断用照明機器 イグザミネーションライト III(カタログ番号:48728) ランプ交換手順



注意: ランプは熱いことがあります。ランプを取り替える前は十分冷却させておいてください。

1. 本体の電源を切り、電源コードを壁面コンセント及び、ライトボックスから引き抜いてください。

2. 周囲に患者さん等がいない作業場所に本体を移してください。

3. ドライバーを使用して、ライトボックスの底から一箇所中央に突き出ているビスをゆるめてください。このビスをゆるめることで、フロントカバーの固定が解放されます。(図 A)



4. 手前にフロントカバーの底をわずかに上げてください、その後、カバーを取り除くために、上にずらしてください。(図 B)



5. 初めてのランプ交換の時は、ランプはワイヤークリップで固定されています。このワイヤークリップを指で下方向に外れるまで引き下ろしてください。取り外したクリップは、輸送の為のもので、廃棄していただいて結構です。(図c)

6. ランプコネクタをつまんで、まっすぐにランプをマウントホルダーから引き抜いてください。(図 D)

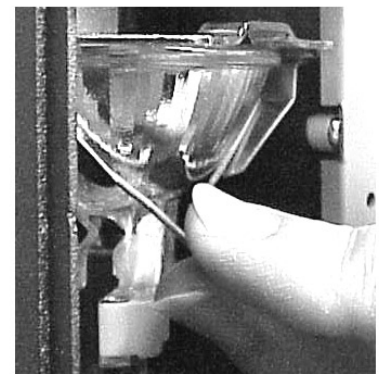


図 C



図 D

7. ランプとコネクタを引き離して、新しい予備電球 #04200-U(イグザミネーションライト III 用)をコネクタへ接続します。(図 E)
8. コネクタの接続されたランプをランプホルダーに元の位置に取り付けてください。
9. フロントカバーはベースになっているボックスに少し上にずれた位置に合わせ、下方向に滑らせることにより、固定ビスで固定できる位置までずらします。その後、ドライバーでビスをまわし、カバーを固定します。

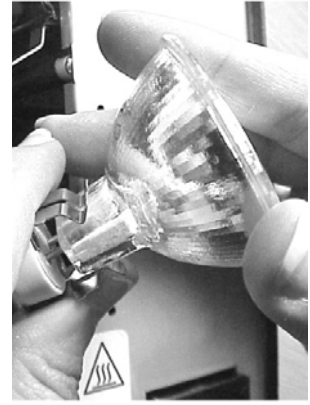


図 E

10. 本体を、元の設置してある場所に戻し、電源コードを本体と壁面コンセントに差し込んでください。

以上で終了です。スイッチを入れ、点灯を確認してください。もし、点灯しない場合は、コネクタの接触、ランプの状態等、再確認してください。それでも改善しないときは、弊社、修理サービスセンターにお問い合わせください。

故障、修理に関するお問合せ

修理サービスセンター

〒134-0086

東京都江戸川区臨海町 3-5-1

東京団地倉庫管理棟 4F

TEL: 03-6383-0852

FAX: 03-5659-2062

— 其他のお問合せ

カスタマーサービスセンター

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町 3-15

錦精社ビル6F

フリーダイヤル TEL: 0120-117-720

FAX: 0120-773-353