



取扱説明書

カタログ番号 03100-LED LED 予備電球(3.5V 耳鏡用)
カタログ番号 03100-U ハロゲン予備電球(3.5V 診断機器用)

-  注意
- ・ 点灯中にランプを直視しないでください。目に悪影響を与えることがあります。
 - ・ 本品は互換性が確認されているウェルチ・アレン純正製品にのみ、装着してください。
 - ・ LED 予備電球の使用が可能な対応モデルは製造元での評価検証の完了した 3.5V 耳鏡に限定しております。ハロゲン予備電球を使用する鼻鏡、イルミネーター、直腸・肛門鏡用ハンドルアダプター等には使用しないでください。

電球の交換方法

-  注意
- ・ ハロゲン予備電球の内部は加圧されています。取り扱いを誤ると割れる可能性がありますので電球の交換作業は保護メガネ等を装着し、電球の表面に擦り傷等の損傷が生じないように、注意して行ってください。また、電球が熱くなっている可能性がありますので、電球の取り外しの際は、電球が十分に冷めた状態になってから行ってください。
 - ・ 電球の廃棄は各自治体の規則に準じて適切に行ってください。

1. 電球を交換する耳鏡または診断機器のヘッドを片手でしっかりと把持してください。
2. もう一方の手で、耳鏡または診断機器のヘッドの電球開口部にピンセットのような金具または付属*の取り外しツールを使ってランプを手前にゆっくりと引き出してください。【図1を参照】
*付属の取り外しツールは LED 予備電球のみに付属されています。
3. 耳鏡または診断機器のヘッドの電球開口部に新しい電球を正しい向きでまっすぐに挿入してください。【図2を参照】
4. 電球が、しっかりと内部に収まるまで中に押し込んでください。【図3を参照】



図1

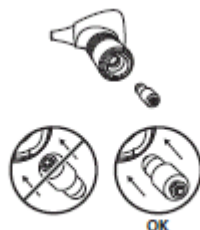


図2



図3

※図は代表例(カタログ番号 20000 3.5V 診断型耳鏡)です。診断機器によりヘッドの電球開口部の位置が異なりますのでご注意ください。

【製造販売元】

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル 6F
フリーダイヤル TEL: 0120-117-720 FAX: 0120-773-353

製造販売業許可番号: 13B2X00086