



## 取扱説明書


カタログ番号 04900-LED LED 予備電球(3.5V 同軸検眼鏡用)  
カタログ番号 04900-U ハロゲン予備電球(3.5V 同軸検眼鏡用)

-  注意
- ・ 点灯中にランプを直視しないでください。目に悪影響を与えることがあります。眼底観察のために患者さんの眼球を照射する場合は 24 時間内での照射時間が 13 分以上(最大光量時)にならないようにしてください。
  - ・ 本品は互換性が確認されているウェルチ・アレン純正製品にのみ、装着してください。

### 電球の交換方法

-  注意
- ・ ハロゲン予備電球の内部は加圧されています。取り扱いを誤ると割れる可能性がありますので電球の交換作業は保護メガネ等を装着し、電球の表面に擦り傷等の損傷が生じないように、注意して行ってください。また、電球が熱くなっている可能性がありますので、電球の取り外しの際は、電球が十分に冷めた状態になってから行ってください。
  - ・ 電球の廃棄は各自治体の規則に準じて適切に行ってください。

1. 電球を交換する同軸検眼鏡ヘッドを片手でしっかりと把持してください。
2. もう一方の手で、同軸検眼鏡ヘッドの電球開口部にピンセットのような金具または付属\*の取り外しツールを使ってランプを手前にゆっくりと引き出してください。【図1を参照】  
\*付属の取り外しツールは LED 予備電球のみに付属されています。
3. 新しい電球の側面の突起(a)と同軸検眼鏡ヘッドの電球開口部の溝(b)の位置を合わせ、同軸検眼鏡ヘッドの電球開口部に新しい電球を正しい向きでまっすぐに挿入してください。【図2を参照】
4. 電球が、しっかりと内部に収まるまで中に押し込んでください。【図3を参照】

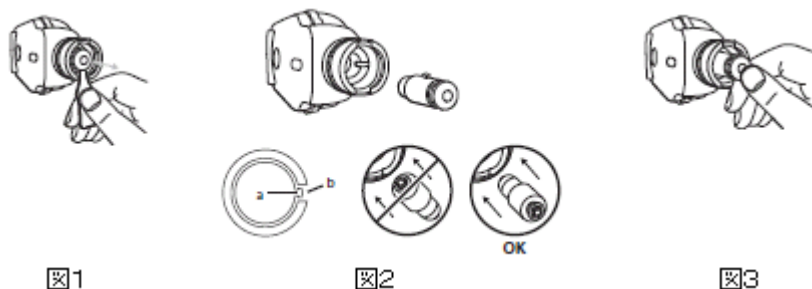

### 【製造販売元】

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社  
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル 6F  
フリーダイヤル TEL: 0120-117-720 FAX: 0120-773-353

製造販売業許可番号: 13B2X00086