

ウェルチ・アレン ビデオコルポスコープ

【警告】

・本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに電源スイッチを切り電源コードをコンセントから抜いた上で乾燥した布などで十分拭き取って下さい。内部に水などの侵入の恐れがある場合は、点検を受け安全が確認されるまで使用しないで下さい。【電気ショックを受ける危険性があります】

・本製品の使用中あるいは使用直後は電球部分が高温になる場合がありますので皮膚などに触れないよう注意して下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・電球を交換する際は、電源コードを抜き、電球部分が高温になっていないことを確認してから交換してください。【電気ショック、熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・光源部周辺は使用により高温になる場合があります。ライトの調整などの際は注意して行って下さい。【熱傷(やけど)などを引き起こす危険性があります】

・本製品の光源を見つめたり、連続して目(眼球)を照明したりしないで下さい。【目の組織(網膜)に障害を引き起こす危険性があります】

・皮膚への損傷リスクを最小限とするために、次の事項を守って下さい。

【皮膚が損傷する危険性があります】

1) 患部組織を診察する場合、光量を最小して下さい。

2) 照射時間を最小限して下さい。

3) 皮膚損傷がある場合や、麻酔の使用により、皮膚感度に変化している場合は特に注意して下さい。

【禁忌・禁止】

・本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では絶対に使用しないで下さい。

【爆発の恐れがあります】

・本機器の分解、改造は絶対行わないで下さい。【故障の原因となります】

・本品は滅菌などの措置は出来ません。【故障の原因となります】

【形状・構造】

ビデオコルポスコープ外観図



89000A

88000A

【使用目的、効能又は効果】

女性器(陰、子宮等)の診察に用いるビデオ機能を備えたコルポスコープである。

【品目仕様等】

電氣的定格:100V 50/60Hz

倍率:4.5~25倍

21W メタルハライドランプ

重量

・ビデオカメラ部:約 1.4Kg

・直立式スタンド:約 11.3Kg

・スイングアーム式スタンド:約 36.3Kg

機器規格

・電撃に対する保護の形式による分類:クラスⅠ機器

・水の有害な侵入に対する保護の程度の分類:IP X 0

【操作方法又は使用方法】

1. スタンドの高さを調整します。
2. ビデオカメラ部の位置を調整します。
3. ビデオカメラ取っ手部の電源スイッチを入れます。
4. 焦点とズームの調整をします。
5. ランプ照射角度の調整をします。
6. グリーンフィルターの On/Off の選択をします。
7. ビデオプリンタ操作ボタンで画像の取り込み画像印刷を行います。

【使用上の注意】

・薬発第495号に基づく「医用電気機器の使用上(安全および危険防止)の注意事項」に従い使用して下さい。

・本品に使用するACアダプター及びアクセサリは弊社指定のもの以外は使用しないで下さい。

・本製品に使用する交換用電球は、弊社指定の物以外は使用しないで下さい。

・使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して点検を行って下さい。

【貯蔵・保管方法】

以下の条件で清潔な場所に保管して下さい。

温度 -20°C~40°C、湿度 95%以下

【保守・点検に係わる事項】

クリーニング

・全てのガラス表面、ルミビュー双眼鏡レンズ、接眼レンズ又はカバーとランプ反射鏡カバーはアルコールを湿らせた柔らかい布でクリーニングします。

・ルミビュー双眼鏡タイプとパワー電源の外装はアルコールを湿らせた柔らかい布できれいに拭くことが出来ます。

ランプ交換

- 1) ランプ交換のため、眼鏡アセンブリを上向きに跳ね上げます。
- 2) ランプ反射鏡ハウジングの底面にある刻み目に親指を置いて、ランプ反射鏡アセンブリを押して、ランプ反射鏡アセンブリを取り外します。
- 3) ランプを取り外し、新しいウェルチ・アレン社製交換ランプNo.08500を反射鏡に取り付けます。
- 4) ランプ反射鏡ハウジングを挿入しロックするまで押し込みます。

バッテリーパッケージの充電

- 1) バッテリーパッケージの電源を OFF にします。
- 2) バッテリーパッケージから装置のパワーコードを取り外します。
- 3) バッテリーパッケージにバッテリーパック充電用 AC アダプターを接続します。
- 4) 充電用 AC アダプターをコンセントに接続します。装置が充電していることを示す LED が点灯します。
- 5) 10~12 時間後フル充電になったらパワー電源から充電用 AC アダプターを取り外します。
- 6) 10 時間のフル充電後 90 分間使用が出来ます。

【包装】

本体:1セット又は1組

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

ウェルチ・アレン・ジャパン株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-15 錦精社ビル

電話番号:03-3219-0071

外国製造所

ウェルチ・アレン、インク(アメリカ合衆国) Welch Allyn Inc.